


PEGASI倍佳睡
智能睡眠眼镜

用户手册

产品简介

PEGASI倍佳睡智能睡眠眼镜，是由深圳前海冰寒信息科技有限公司出品的用于优化睡眠质量的智能硬件。它遵循环球优良生物医学科技研究成果，采用专利发光模组技术，将智能光融入了配合人体工程学开发的智能眼镜。它将帮助人们调节睡眠节律，唤醒睡眠机能，克服睡眠障碍，优化睡眠质量，调节商旅时差。

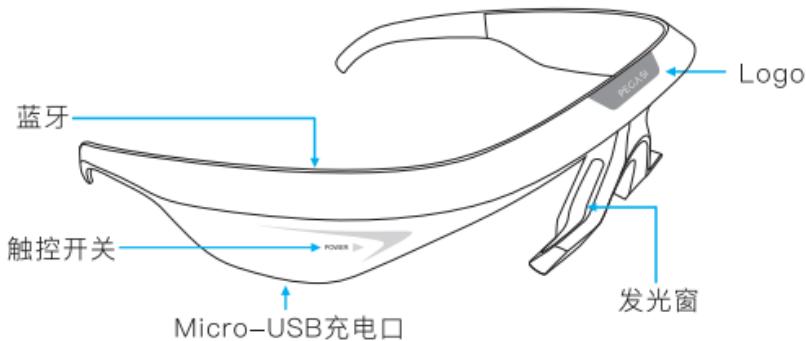

配件：1. USB充电线 2. 耳托 3. 用户手册 4. 产品说明

技术参数

输入电压：DC 5.0V

输入电流：270mA

电池类型：锂离子聚合物电池

电池容量：250mAh

连接方式：蓝牙4.0

备注：1. 本用户手册所列举的眼镜使用模式均为默认时长每次30分钟。
2. 眼镜每充满一次电，在正常室温环境下约可使用3次。

使用方法

1



取出眼镜并正确佩戴

2




轻拍两下眼镜右侧触控开关

3



使用▲

4

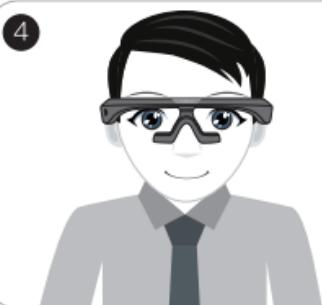

30分钟自动关闭，或轻拍2下
眼镜右侧触碰开关手动关闭



注：PEGASI倍佳睡智能睡眠眼镜按默认时长工作，程序结束后将自动关闭。使用时请自然睁眼，接受光波照射，为保证调节效果，不建议用户提前中断程序。

适用人群

适用于入睡困难、起床困难、睡时多梦、深度睡眠少、容易早醒、生物钟紊乱、精神状态差、值夜班、倒时差等睡眠障碍人群。

- 使用方法



1. 入睡困难/起床困难/ 多梦/浅睡/生物钟紊乱

每天早上**7:00**至**9:00**间使用一次，请连续使用**7天**以上或达到预期效果即可。



2. 早醒（一般早于凌晨5 点觉醒，之后无法再次入 睡，常见于老年人）

每天晚上**19:00**至**21:00**间使用一次，请连续使用**7天**以上或达到预期效果即可。



3.调节时差

到达目的地后当地时间
8:00–21:00期间如有困意立
即佩戴智能睡眠眼镜，避免
日间打盹或入睡，夜晚便可
轻松入睡，快速摆脱时差困
扰。请连续使用两天以上或
达到预期效果即可。

4.其他

更多使用方法请咨询PEGASI倍佳睡24小时客服电话：400-961-8288。

注意事项

- 本产品不适合13岁以下人群使用
- 请勿在驾车时使用本产品，如有需要，可在开车前或者安全停车后使用。
- 如有任何眼部疾病，譬如但不限于白内障、青光眼、黄斑病变或曾做过重大眼部手术，请在使用本产品前咨询眼科医师。
- 请勿闭眼使用本产品。
- 初次使用本产品建议在环境明亮处。
- 为安全考虑，请勿在充电时使用本产品。
- 请勿在佩戴彩色/茶色眼镜的同时使用本产品。
- 如果您佩戴近视眼镜或远视眼镜，可以将本产品套在您的眼镜外面使用，但请确保您的眼镜边框未挡住本产品发出的光线。

安装APP

4

A. 扫描下方二维码快速下载安装



B. 其他安装方法

- 进入PEGASI倍佳睡官网www.pegasiglass.com下载安装。
- 在小米应用商店、Google Play或苹果APP Store应用商店中搜索“倍佳睡”应用下载安装。




设备要求：安卓4.4以上版本或iOS8.0以上版本，支持蓝牙4.0。

绑定PEGASI倍佳睡眼镜

- 首次使用眼镜请通过USB线充电，以确保眼镜电量充足。
- 打开倍佳睡APP，按以下指示操作绑定眼镜：



完成注册

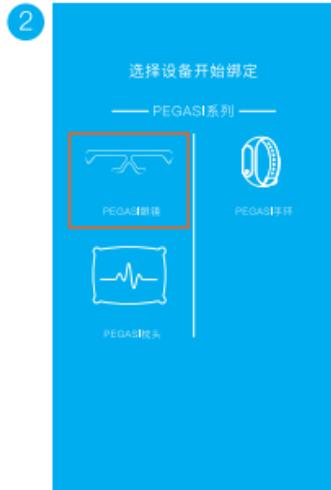

添加眼镜



搜索眼镜




触摸确认→绑定成功


日常维护

充电与电量指示

- 充电期间，眼镜发光窗蓝色呼吸灯会持续闪烁，以提示眼镜正在充电。呼吸灯熄灭表示充电完成。

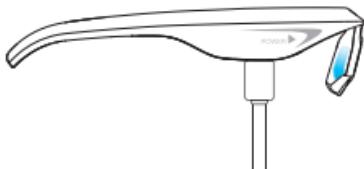

正在充电

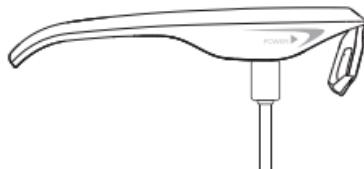

充电完成

- 眼镜处于低电量时发光窗会**快速闪烁**提示用户充电。
- 眼镜的电量可以从APP上获取。



维护

本产品为智能硬件，为避免眼镜受损，切勿使液体渗入产品壳体内。如长期未使用，请确保本产品放置于干燥、阴凉处，并建议每3个月进行充放电1次。

PEGASI倍佳睡保修凭证

PEGASI倍佳睡售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费权益法》
《中华人民共和国产品质量法》实行售后保修服务，服务内容如下：

- 1、自您签收之日起7日内，PEGASI倍佳睡出现《PEGASI倍佳睡商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由冰寒售后服务中心检测确定，可免费办理退货或者换货。
- 2、自您签收日起31日内，PEGASI倍佳睡出现《PEGASI倍佳睡商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由冰寒售后服务中心检测确定，可免费办理换货或者维修。
- 3、自您签收日起12个月内，PEGASI倍佳睡出现《PEGASI倍佳睡商品性能故障表》所列性能故障的情况，经由冰寒售后服务中心检测确定，可免费进行维修。

PEGASI倍佳睡商品性能故障表（附表）

部件	性能故障
产品主体	<ul style="list-style-type: none">• 开关失效• 说明书所列功能失效• 不能发出蓝光• 因结构或者材料因素造成外壳裂损• 无法与指定设备同步
充电线	<ul style="list-style-type: none">• 无法正常给眼镜充电

符合下列情况之一者，不在保修范围，冰寒售后服务中心将进行收费修理：

- 1、超过保修有效期的。
- 2、无保修凭证
- 3、无有效发票
- 4、保修凭证与产品标识不符
- 5、保修凭证被涂改



- 6、未按使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的
7、擅自拆卸、维修产品或修改系统软件造成损坏或功能异常的
8、浸水、摔坏或其他人为因素导致的损坏。

PEGASI倍佳睡三包凭证

用户信息			
姓名		电话	
电子邮箱			
邮政编码			
联系地址			
产品信息			
产品序列号		购买日期	
购买门店/其他途径:			
维修记录			
送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字



常见问题 (FAQ)

1、智能睡眠眼镜是睡觉时佩戴吗？

不是。本眼镜所采用的特殊技术可以在非睡眠时间段内改善您的睡眠，通常是早上戴，晚上睡（早醒除外），具体使用方法请参考P3-P4。

2、为什么发光窗闪烁？

发光窗闪烁说明眼镜处于低电量状态，请及时给眼镜充电以确保正常使用。

3、如何给眼镜充电？

- a) 将充电线的USB接头插入眼镜充电接口，另一侧接入电源适配器，眼镜将开始充电。
- b) 充电期间，眼镜发光窗蓝色呼吸灯持续闪烁，以提示正在充电。呼吸灯熄灭表示充电完成。
- c) 充电时间与眼镜电量有关，一般不超过70分钟。

4、眼镜和倍佳睡APP无法绑定怎么办？

- a) 请将眼镜贴近手机。
- b) 请确保眼镜电量充足。
- c) 请触摸眼镜右侧开关以激活蓝牙。
- d) 如果上述操作后仍不成功，可以尝试重启手机蓝牙。
- e) 如果重启手机蓝牙无效，请尝试重启手机。

5、眼镜偏大，戴不稳，总是掉？

本眼镜按通用尺寸设计，以适合大众使用。为满足更多需求，我们还温馨的为您配备了防滑耳托，可以套在镜腿上防止眼镜滑落。

6、开车的时候能使用吗？

为了您的安全，我们不建议您在驾驶过程中使用本眼镜。如有需要，可在开车前或者安全停车后使用。

7、感觉光线刺眼如何处理？

拥有国家电光源质量监督检验中心IEC 62471标准检测“无危害类”安全等级检测报告及美国（倍科）国际电光源EN 62471:2008标准检测安全检测报告，使用更放心。您可以放心使用。PEGASI倍佳睡APP同时提供了多档优化方案供用户选择，您可以根据自身情况选择适合您的专属方案。

8、为什么戴上没特别感觉？

本眼镜通过特殊光线影响人体内多种激素的分泌水平，以物理方法调节人体生物钟节律，在安全和无感知的情况下提高您的睡眠质量。

9、为什么戴上当天没效果？

本眼镜的一个周期为7天左右，为更好的解决您的睡眠问题，请坚持连续使用。

10、需要盯着光源看吗？

不需要。本眼镜的发光窗采用了独特的广角设计，在睁眼状态下，光线均可照射到眼底的感光细胞，实现眼镜预期功能。

11、睡眠调节好之后，还需要继续使用吗？

使用本眼镜优化睡眠不会产生任何依赖性。但在睡眠质量提升后，我们仍建议您每月使用一个周期（7天左右）以巩固优化效果。

12、售后客服？

客服1：PEGASI倍佳睡客服电话400-961-8288

客服2：在线联系天猫PEGASI倍佳睡旗舰店客服/京东PEGASI倍佳睡旗舰店客服

客服3：扫描下方二维码关注PEGASI倍佳睡官方微信公众号咨询客服





更多信息请关注PEGASI倍佳睡官方微信公众号

深圳前海冰寒信息科技有限公司

深圳市南山区粤海街道科研路9号比克科技大厦4楼

邮编：518057

电话：400-961-8288

网址：www.pegasiglass.com

深圳前海冰寒信息科技有限公司，著作权所有。

未经冰寒科技书面同意，任何个人或组织不得复制、修改或翻译本使用说明书的任何部分。